



# Orden de Recolección de Muestras Sangre

www.labnova.mx

- 1
Tubo de descarte\* y Hemocultivo

- 2
Coagulación/CTAD\*

- 3
Suero con o sin gel

- 4
Heparina con o sin gel

- 5
EDTA con o sin gel

- 6
Glucosa


\*Al utilizar equipos alados y si el tubo azul fuera el primero a utilizar, es importante recordar que debe utilizarse antes un tubo de descarte, por el aire almacenado en el tubo flexible que puede alterar las proporciones de anticoagulantes-muestra. El tubo de descarte puede ser cualquiera que no tenga aditivos

\*\*Si su tubo no esta incluido en este diagrama, recólcetelo al final

**Referencia en CLSSI : Standard XLA1 H03a6**  
Procedures for the Collection of Diagnostics blood Specimens by Venipuncture.

